


Chytrý polštář proti chrápání

motion pillow

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

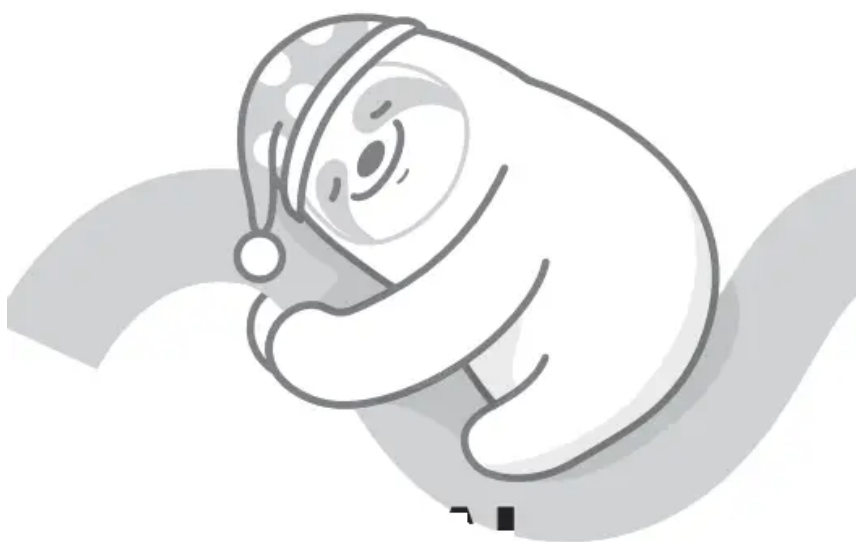

Produkt lze používat i bez aplikace, ale více funkcí získáte instalací dedikované aplikace do chytrého telefonu nebo tabletu. Více informací o aplikaci naleznete v rychlém průvodci.

Uživatelský manuál je také dostupný přímo v aplikaci. Tento manuál může být průběžně aktualizován na základě zpětné vazby uživatelů.


Obsah

1. Součásti balení
2. Struktura a použití produktu
3. Údržba
4. Upozornění

1. Součásti balení




2. Struktura a použití produktu

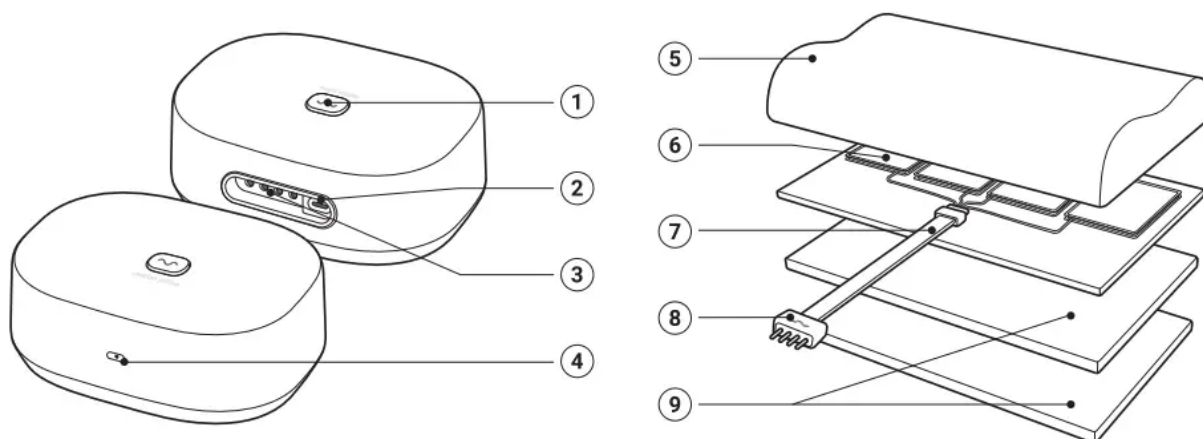

Jak nastavit a používat zařízení


1. Umístěte pohybový systém do správné polohy a ve správném směru.

Zarovnejte jej s výškou hlavy uživatele a umístěte jej blízko obličeje (doporučená vzdálenost: 0,5–1,2 m). Ujistěte se, že mikrofon je otočen směrem k uživateli.

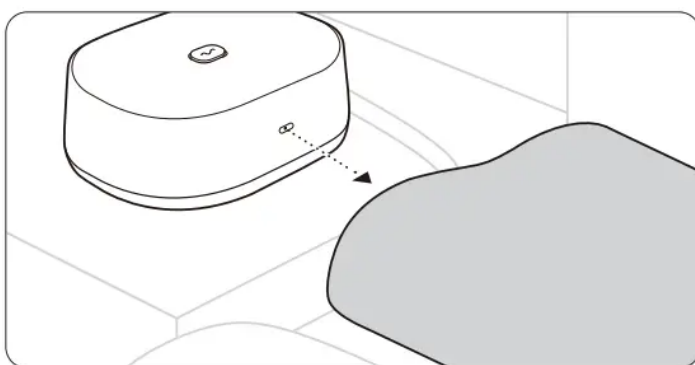

2. Uložení vzduchové hadičky


V závislosti na umístění pohybového systému vytáhněte vzduchovou hadičku doprava nebo doleva tak, aby procházela horní kapsou vnitřního potahu.

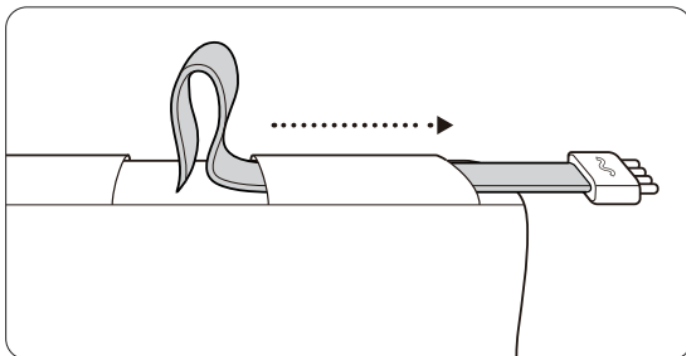

3. Připojení pohybového systému


Po připojení konektoru pohybového systému zapojte napájecí kabel.

Používejte výhradně přiložený adaptér a napájecí kabel určený pro Motion Pillow.

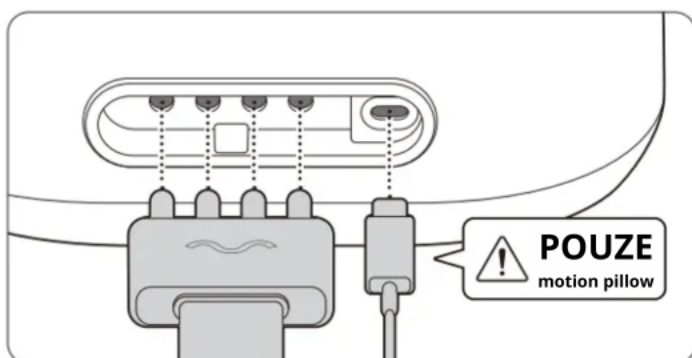


4. Pokud je napájení správně připojeno, zařízení přejde do pohotovostního režimu. V tomto režimu svítí žlutá LED kontrolka.

Při testování přes aplikaci bude žlutá LED kontrolka blikat.

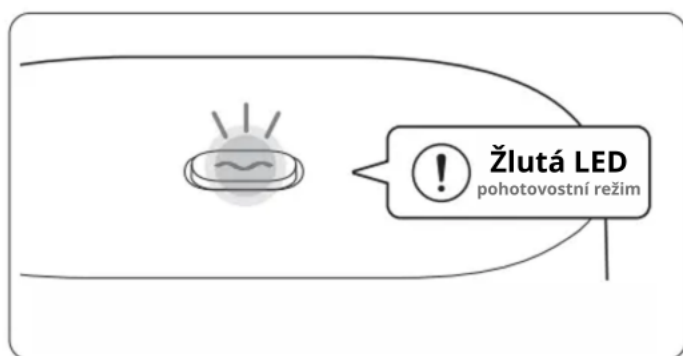

Jak používat


1. Před spaním zapněte zařízení a podržte tlačítko napájení cca 2 sekundy – tím přepnete zařízení do režimu spánku. V tomto režimu svítí zelená LED kontrolka.

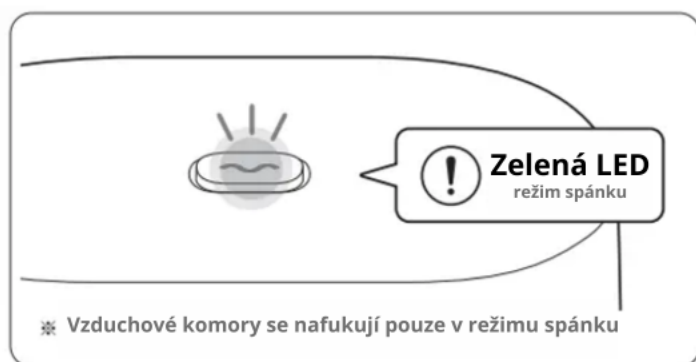


2. Po probuzení vypněte zařízení – opět podržte tlačítko napájení cca 2 sekundy, čímž zařízení přejde do pohotovostního režimu (žlutá LED).



3. Pro přesné fungování potřebuje pohybový systém několik dní (2–7) na naučení vašeho vzoru chrápání. (Doba se může lišit podle uživatele.) Prosím, používejte tedy polštář dostatečně dlouhou.

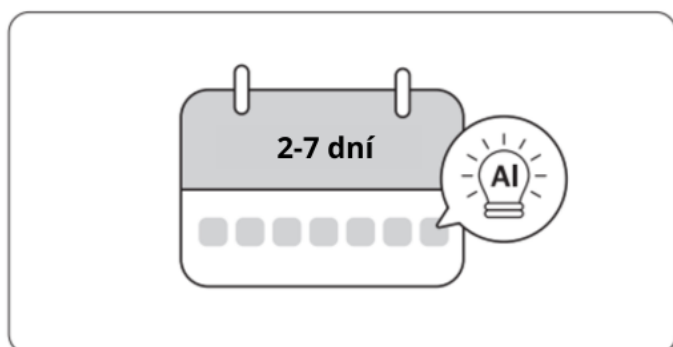

4. Pomocí dvou podložek pro nastavení výšky, které jsou součástí balení, lze výšku polštáře nastavit podle preferencí uživatele.

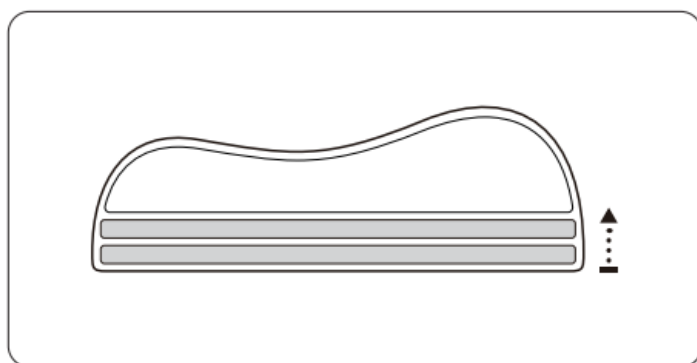

3. Údržba

Skladování

Ukládejte výrobek na bezpečné místo, kde nebude vystaven ohni, vodě (vlhkosti) nebo přímému slunečnímu záření. Pokud je polštář zdeformovaný nebo skladovaný v nevhodném prostředí, může dojít k poruše.

Potah polštáře lze sundat a vyprat. Výrobek skladujte ve správné poloze.

Potah polštáře



Vnitřní potah a paměťová pěna



Opravy

Pokud během provozu dojde k chybě, odpojte napájecí kabel a odešlete zařízení do servisního střediska (A/S) v centrále.

V případě neoprávněného rozebrání nebo pokusu o opravu není možné poskytnout záruku ani servis.

Informace o produktu

- Název produktu: Motion Pillow
- Vstupní napětí: 5 V
- Spotřeba energie: do 10 W
- Zákaznická linka: +82 1688 0156
- Webové stránky: www.10minds.com
- Hmotnost: 3 110 g (všechny komponenty)
- Rozměry:
 - Pohybový systém: 195 × 145 × 75 mm
 - Polštář s vestavěným vzduchovým vakem: 550 × 350 × 90/70 mm
 - Výšková podložka: 540 × 330 × 15 mm

4. Bezpečnostní upozornění

- Tento produkt není zdravotnický prostředek – kromě dočasné úlevy od chrápání jej nelze použít k diagnostice ani léčbě.
- Máte-li bolesti krku, zad nebo potíže s krční páteří, poraďte se před použitím se svým lékařem.
- Pokud při používání pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přerušete používání.
- Dojde-li během používání k poruše, ihned zařízení vypněte a kontaktujte zákaznický servis nebo prodejce.
- Děti smějí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dbejte na bezpečné zapojení napájení.
- Vyhněte se prostředí, které by mohlo zařízení poškodit (vlhkost, voda, oheň).
- Neházejte s výrobkem ani jej nepoškozujte ostrými předměty.

- Neprovádějte samovolnou demontáž pohybového systému ani polštáře se vzduchovým vakem.
- U silně chrápajících osob může být účinnost nižší.
- Pokud zařízení ještě plně nevyhodnotilo váš vzorec chrápání, může reagovat i na běžné okolní zvuky (např. televize, konverzace).
- Používejte pouze přiložený napájecí adaptér a kabel. Nepoužívejte je k nabíjení jiných zařízení – může dojít k poruše.
- Adaptér i kabel jsou speciálně navrženy pro tento produkt a liší se od běžných USB-C adaptérů.

Upozornění! Přečtěte si prosím

Q: Je tento produkt účinný proti všem typům chrápání?

A: U centrálního nebo smíšeného chrápání, které vyžaduje lékařský zákrok nebo zařízení, může být účinek omezený. U obstrukčního chrápání – nejčastějšího typu – však může být velmi účinný. Přestože jde o pomocný nástroj, produkt není určen k úplné léčbě nebo diagnostice.

Q: Lze produkt používat bez připojení do zásuvky?

A: Ne. Zařízení musí být během používání připojeno k elektrické síti pomocí přiloženého adaptéru a kabelu.

Q: Je nutná aplikace pro používání produktu?

A: Ne, zařízení lze používat i bez aplikace. Pokud však chcete přístup k rozšířeným funkcím, jako je přizpůsobení nebo sledování spánkových dat, je připojení k aplikaci doporučeno.

Q: O jaký produkt se jedná?

A: Motion Pillow je chytrý polštář proti chrápání, který dočasně ulevuje od chrápání tím, že při jeho detekci nafoukne vzduchový vak pod hlavou uživatele. Tím jemně otočí hlavu na stranu a uvolní dýchací cesty.

Q: Zdá se, že produkt nefunguje (nepoznám, jestli je účinný).

A: Zařízení začíná rozpoznávat chrápání až po určité době používání. Čím déle ho používáte, tím přesněji rozpozná váš spánkový vzorec a reaguje na něj efektivněji. Doporučujeme produkt používat alespoň 2 týdny. Pokud ale systém „naučí“ jiné zvuky (např. okolní hluk), může reagovat nesprávně.

EU prohlášení o shodě – CE

Společnost 10minds Co., Ltd. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Plné znění dokumentace RED Do lze stáhnout na:

<http://www.motionpillow.com>

Video manuál je dostupný na YouTube:



<http://m.site.naver.com/0MiEo>

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Zařízení bylo testováno a odpovídá limitům pro třídu B digitálních zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácím prostředí.

Pokud zařízení způsobuje rušení televizního nebo rozhlasového příjmu, zkuste:

- Otočit nebo přemístit anténu
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojit zařízení do jiného okruhu než přijímač
- Požádat o pomoc odborníka na radiotechniku/TV

RF upozornění pro přenosná zařízení:

Zařízení bylo vyhodnoceno jako bezpečné pro běžné vystavení RF záření – bez omezení.

IC Statement

(CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

RSS-Gen Issue 5 February 2021" & "CNR-Gen Se édition Février 2021

Zařízení splňuje licenčně osvobozené normy RSS organizace Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma

podmínkám:

1. Zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Zařízení je bezpečné i pro běžné přenosné použití bez omezení.