



**NÁHRADNÍ ELEKTRODY PRO
ELEKTROSTIMULÁTOR BLUETENS
CLASSIC 2**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Jak elektrody používat

- 1) Před nasazením nebo sejmutím elektrod se ujistěte, že je přístroj Bluetens vypnutý.
- 2) Elektrody špatně drží, pokud na pokožce zůstane jakýkoli krém, pleťová voda, olej apod. Před každou aplikací pokožku očistěte a osušte.
- 3) Před aplikací připněte kabel s elektrodami.
- 4) Umístěte elektrody podle pokynů pro umístění navržených v aplikaci. Pevně přitlačte od středu elektrod k vnějším okrajům, celý povrch elektrod musí být v kontaktu buď s vaší pokožkou. Přílnavost se zlepší, když elektrody dosáhnou teploty kůže.
- 5) Po použití umístěte elektrody zpět na správnou stranu ochranné plastové fólie a vložte je zpět do uzavřeného sáčku, abyste zabránili vysychání gelu. Neodstraňujte elektrody tahem za kabel, zvedněte roh elektrody a pomalu ji odlepte od kůže, přitom se co nejméně dotýkejte přílnavého gelu.
- 6) Elektrody jsou určeny pouze pro použití jedním pacientem. Počet aplikací závisí na stavu vaší pokožky, anatomickém umístění, typu léčby a péči po použití. Pokud adhezivní gel zaschne, můžete přidat jednu nebo dvě kapky obyčejné vody rovnoměrně a jemně ji rozetřít konečky prstů. Nepoužívejte příliš mnoho vody, protože by to mohlo snížit životnost gelu.
- 7) Sáček s elektrodami skladujte při pokojové nebo chladné teplotě (5-25 °C) a chraňte před přímým sluncem.