

iHealth™

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PUSH KD 723

Zápěstní tlakoměr s displejem



iHealth PUSH KD 723
Zápěštní tlakoměr s displejem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Poslední aktualizace 5.10.2020

Obsah

DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
SOUČÁSTI A INDIKÁTORY DISPLEJE	3
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	4
KONTRAINDIKACE.....	4
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	4
SPECIFIKACE	5
ÚKONY PŘED MĚŘENÍM KREVNIHO TLAKU	5
OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6
PŘED PRVNÍM MĚŘENÍM	7
PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ KREVNIHO TLAKU	8
POLOHA TĚLA V PRŮBĚHU MĚŘENÍ	9
MĚŘENÍ KREVNIHO TLAKU	9
ZOBRAZENÍ ULOŽENÝCH ÚDAJŮ	10
SYNCHRONIZACE ULOŽENÝCH ÚDAJŮ	10
SMAZÁNÍ ÚDAJŮ Z PAMĚTI	11
HODNOCENÍ KREVNIHO TLAKU U DOSPĚLÝCH OSOB.....	11
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	12
PÉČE A ÚDRŽBA	13
KONTAKTY A ZÁKLAZNICKÝ SERVIS	13
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ	14

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Fyziologické kolísání krevního tlaku

Jakákoliv fyzická aktivita, rozrušení, stres, jezení, pití, kouření, změna tělesné pozice a další aktivity a faktory (například samotné měření krevního tlaku) mohou ovlivnit hodnoty krevního tlaku. Kvůli tomu je téměř nemožné získat pokaždé stejné výsledky po sobě jdoucích měření.


Krevní tlak v průběhu dne i noci neustále kolísá. Nejvyšší hodnoty se obvykle vyskytují přes den a nejnižší kolem půlnoci. Hodnota krevního tlaku následně typicky vzrůstá okolo 3. Hodiny ráno a nejvyšších hodnot dosahuje v době, kdy je člověk vzhůru a aktivní. Zahrňte předchozí informace do svého plánu každodenního měření krevního tlaku a provádějte jej vždy v přibližně stejnou denní dobu.

Příliš časté měření může způsobit zranění vlivem přerušovaného průtoku krve. Prosíme dbejte na přestávky mezi jednotlivými měřeními, které by měly trvat alespoň 60 – 90 sekund. Přestávka zajistí obnovení krevní cirkulace v paži.

SOUČÁSTI A INDIKÁTORY DISPLEJE

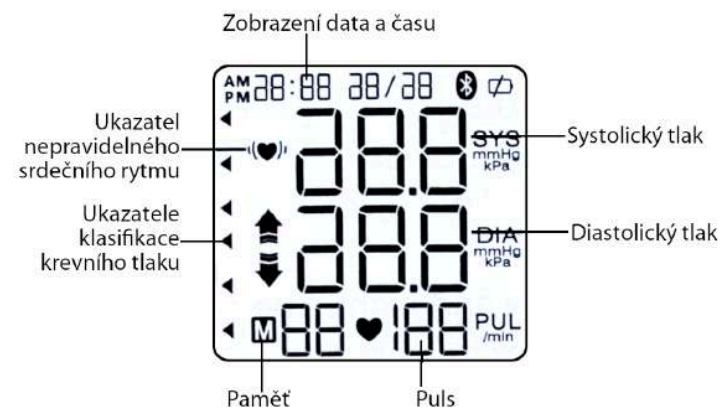

- Ukazatel Bluetooth
- Vybitá baterie
- Nestabilní tlak v manžetě nebo příliš zbytkového vzduchu v manžetě
- Ukazatel srdečního tepu

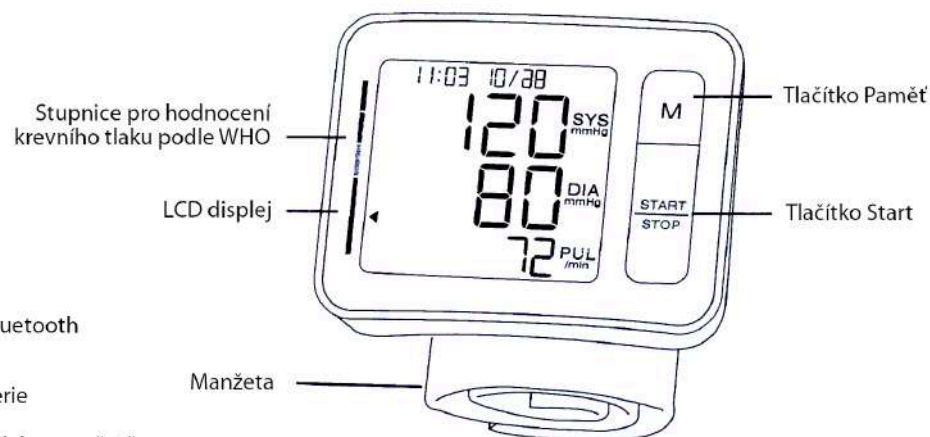

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Automatický zápěstní tlakoměr iHealth Push KD 723 je určen pro profesionální použití nebo pro použití v domácím prostředí. Jedná se o neinvazivní systém měření krevního tlaku. Je určen k měření systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence u dospělého jedince metodou zahrnující použití nafukovací pažní manžety. Zařízení detekuje nepravidelný srdeční rytmus v průběhu měření a na základě pozitivního výsledku vydává varovný signál.



Poradte se s lékařem ohledně správné interpretace výsledků krevního tlaku. Vlastní diagnostika naměřených hodnot a samoléčba jsou nebezpečné.



Tlakoměr je určen pro dospělé uživatele. Nepoužívejte pro měření krevního tlaku u dětí.

KONTRAINDIKACE



Přístroj iHealth Push KD 723 není určený pro osoby se závažnou arytmií.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Krevní tlak a puls je měřený neinvazivně a automaticky oscilometrickou metodou s pomocí integrovaného silikonového tlakového senzoru. Výsledek s hodnotami krevního tlaku a tepu se zobrazí na LCD displeji. Interní paměť přístroje uchová posledních 99 měření s datem a časem měření.

Elektronický sphygmomanometr odpovídá těmto standardům: IEC 60601-1 Edition 3.1 2012-08/EN 60601-1: 2006/A1: 2013 (Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance), IEC60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 (Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests), IEC80601-2-30:2009+AMD1: 2013/EN 80601-2-30:2010/A1: 2015 (Medical electrical equipment -Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers), EN 1060-1: 1995 + A1: 2002 + A2: 2009 (Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements), EN 1060-3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems); ISO81060-2: 2013 (non-invasive Sphygmomanometers- Part 2: Clinical Validation Of Automated Measurement Type).

Kompatibilita s mobilními zařízeními

Kompatibilní se systémy iOS a Android. Kompletní seznam kompatibilních zařízení najdete na www.ihealthlabs.com

SPECIFIKACE

1. Název produktu: iHealth Push
2. Model: KD 723
3. Klasifikace: interní napájení; kategorie zařízení přicházejících do kontaktu s lidským tělem; IP22, bez AP nebo APG; nepřetržitý provoz
4. Velikost zařízení: cca 80 mm × 60 mm × 22 mm
5. Obvod manžety: 14 cm až 19,5 cm
6. Hmotnost: cca 96 g (zahrnuje manžetu)
7. Metoda měření: oscilometrická, automatické nafukování a měření
8. Interní paměť: posledních 99 měření s časem a datem
9. Napájení: baterie: 2 x 1,5 V, AAA
10. Rozsah měření: Tlak manžety: 0 – 300 mmHg; Systola: 60 – 260 mmHg; Diastola: 40 – 199 mmHg; Tepová frekvence: 40 – 180 úderů za minutu
11. Přesnost: Tlak: ± 3 mmHg; Tepová frekvence: ± 5 %
12. Teplota okolního prostředí pro provoz: 10 °C – 40 °C
13. Vlhkost okolního prostředí pro provoz: ≤ 85 % RH
14. Teplota okolního prostředí pro skladování a přepravu: - 20 °C až 50 °C
15. Vlhkost okolního prostředí pro skladování a přepravu: ≤ 85 % RH
16. Tlak okolního prostředí: 80 kPa – 105 kPa
17. Výdrž baterií: přibližně 170 měření
18. Bezdrátové připojení: Bluetooth Smart 4.0, kmitočtové pásmo: 2 400 ~ 2 4835 GHz
19. Systém pro měření krevního tlaku nedílně zahrnuje: čerpadlo, ventil, LCD displej, manžeta, senzor

Poznámka: Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ÚKONY PŘED MĚŘENÍM KREVNÍHO TLAKU

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte informace a instrukce uvedené v návodu a na balení.

K zajištění nejpresnějších hodnot měření se řiďte těmito pokyny:

- Alespoň 5 minut před měřením zůstaňte v klidu. Měření by mělo probíhat na klidném místě.
- Stres zvyšuje krevní tlak. Vyhněte se měření tlaku pokud jste ve stresu.
- Z ruky odstraňte těsné oblečení.
- Posade se na židli s nohama rovně na zemi. Položte si ruku na stůl tak, aby manžeta na ruce byla v úrovni vašeho srdce.

- Krevní tlak v průběhu dne přirozeně kolísá. Nejvyšší hodnoty se obvykle objevují v denní době a nejnižší kolem půlnoci. Hodnoty se typicky začínají zvyšovat kolem 3 hodin ráno a dosahují nejvyšších hodnot v době, kdy se lidé ráno budí a začínají být aktivní.
- Uchovávejte své výsledky měření pro svého lékaře. Jednotlivá měření neposkytují ucelenou indikaci vašeho krevního tlaku. Pro ucelené výsledky měřte svůj tlak pravidelně, alespoň jednou denně ve stejnou dobu.
- Dbejte na přestávky mezi jednotlivými měřeními, které by měly trvat alespoň 60 – 90 sekund. Přestávka zajistí obnovení krevní cirkulace v paži a zabrání možnému vzniku podkožního krvácení (ekchymom).

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Použití tlakoměru by mohlo vyžadovat profesionální lékařskou asistenci v těchto případech


- *Použití tlakoměru Push konzultujte s lékařem v těhotenství, při doagnostikované arytmií nebo ateroskleróze (kornatění tepen).*
- *Tento monitor je určen pro dospělé a neměl by být používán u kojenců, malých dětí nebo v těhotenství (pro tyto případy nebyly provedeny testy)*
- *Tento monitor by neměl být používán při pre-eklampsii.*
- *Použití tlakoměru Push konzultujte s lékařem v případě nutnosti použití manžety přes zranění nebo zánět.*
- *Použití manžety na jakékoli straně, kde je intravaskulární přístup nebo terapie, nebo arterio-venózní (AV) píštěl.*
- *Použití manžety na straně, kde byla provedena masektomie.*
- *Pokud na stejné ruce používáte další zdravotnické monitorovací zařízení.*
- *Pokud potřebujete kontrolovat krevní oběh uživatele.*
- *U osob se závažným onemocněním průtoku krve nebo krevními poruchami může nafouknutí manžety způsobit vnitřní krvácení.*
- *Zařízení by nemělo být použito u osob se špatnou periferní cirkulací, výslovně v případě nízkého krevního tlaku, nebo nízké tělesné teploty (kdy nebude zajištěn dostatečný krevní průtok v místě měření)*
- *Zařízení nelze aplikovat pacientům s umělými plícemi nebo srdcem.*

Obecná opatření týkající se použití

- Výsledky měření krevního tlaku získané uvedeným produktem jsou ekvivalentní těm, které získají profesionální zdravotničtí pracovníci metodou vyšetření poslechem manžeta / stetoskop v rámci mezi stanovených Americkou národní normou (American National Standard), elektronickým nebo automatizovaným tlakoměrem.
- Zamýšleným uživatelem je pacient.
- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí a osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než k měření krevního tlaku.
- Nepoužívejte zařízení pokud trpíte alergií na plasty.
- Současné použití mobilního telefonu nebo jiného zařízení, které emituje elektromagnetické záření, může vést k chybnému výkonu přístroje.
- Nerozebírejte monitor ani manžetu.
- Nepoužívejte prosím jinou manžetu, než která byla dodána výrobcem. Neoriginální manžety mohou způsobovat nepřesná měření.
- Doporučuje se použití tlakoměru 10 metrů od dalších bezdrátových zařízení (např. Smartphony, WLAN, mikrovlnné trouby apod.).

- Je-li rozsah měření mimo kategorie uvedené v části SPECIFIKACE, nebo není detekován LCD monitor zobrazí technický alarm jako “Hi” nebo “Lo”. V takovém případě opakujte měření, abyste se ujistili o správnosti procesu měření, nebo výsledky konzultujte se svým lékařem. Technický alarm nelze vypnout a navyžaduje resetování. K automatickému vypnutí dojde po 8 sekundách.
- Nepoužívejte tento tlakoměr v jedoucím vozidle. Užití za těchto podmínek by mohlo vést k chybným výsledkům.
- Pohyb, třes a chvění mohou ovlivnit výsledek měření.

Je-li detekován nepravidelný srdeční rytmus

- Při detekci nepravidelného srdečního rytmu (Irregular Heartbeat – IHB) se v průběhu měření objeví na displeji příslušný  IHB symbol. V takovém případě můžete pokračovat v měření, ale výsledek může být nepřesný. Prosím konzultujte takový výsledek se svým lékařem.
- Symbol IHB se objeví ve 2 případech:
 - 1) Variační koeficient (CV) tepové periody > 25%
 - 2) Rozdíl v pulsu v rámci příslušného období je $\geq 0,14$ s a je vyšší než 53 % z celkového počtu naměřených tepů spadajících do této kategorie.



Tento monitor je určen pro dospělé a nikdy by neměl být používán u kojenců, malých dětí, těhotných nebo pre-eklamptických pacientů. Před použitím u dětí se poradte se svým lékařem.



Tento produkt nemusí splňovat své výkonové specifikace, pokud je skladován nebo používán mimo stanovené rozsahy teploty a vlhkosti.



Nesdílejte manžetu s jakoukoliv infekční osobou, abyste předešli přenosu infekce.

PŘED PRVNÍM MĚŘENÍM

• Stáhněte si bezplatnou aplikaci iHealth MyVitals


Před prvním použitím si stáhněte a nainstalujte iHealth MyVitals z App Store (iOS zařízení) nebo Google Play (Android zařízení). Postupujte podle pokynů na obrazovce pro registraci a nastavení osobního účtu.


• Navštivte účet na iHealth Cloud

Váš účet iHealth umožňuje také přístup k bezplatné a zabezpečené službě iHealth Cloud. Přejděte na www.ihealthlabs.eu, klikněte na “Sign In” (Přihlásit se) a přihlaste se pomocí stejného účtu.

• Vložení baterií

- 1) Otevřete kryt baterií na zadní části přístroje
- 2) Vložte 2 AAA baterie. Pozor na správné umístění podle polarity.
- 3) Zavřete kryt.


 Pokud LCD displej zobrazuje symbol vybité baterie, vyměňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Pokud tlakoměr nepoužíváte déle jak měsíc, baterie z přístroje vyjměte, aby nedošlo k úniku náplně baterií. Zabraňte vniknutí obsahu baterií do očí. V případě, že se tak stane, okamžitě vypláchněte zasažené místo proudem čisté vody a kontaktujte lékaře.

 Monitor, manžetu a baterie po uplynutí doby jejich použitelnosti zlikvidujte na místě zpětného odběru odpadu.

• **Nastavení data a času**

- Po vložení baterií nebo vypnutí monitoru přejde přístroj do režimu stand-by; na displeji nebude nic zobrazeno.
- Je-li displej ve stand-by režimu pro nastavení data a času stiskněte společně tlačítko “START/STOP” a “M” po dobu 3 sekund. První začne blikat časový formát.
- Stiskněte opakovaně tlačítko “START/STOP” – postupně bude blikat nastavení data, hodin a minut. Pokud číslo bliká, pro změnu hodnoty stiskněte tlačítko “M”.


- 1) Nastavení hodnoty potvrdíte vypnutím displeje stisknutím tlačítka “START/STOP” ve chvíli, kdy hodnota bliká.
- 2) Displej se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti bez změny data a času.
- 3) Datum a čas je potřeba nastavit po každé výměně baterií.

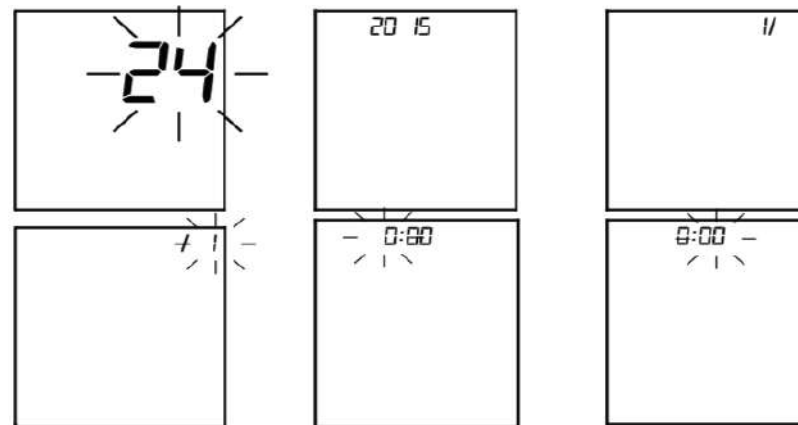

PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

• **Nasazení manžety**

1. Umístěte manžetu okolo holého zápěstí 1 – 2 cm od předělu dlaně a zápěstí.
2. V poloze v sedě položte předloktí s nasazeným tlakoměrem na podložku (stůl). Je-li tlakoměr správně nasazený, měli byste v této poloze pohodlně odečítat z displeje.
3. Manžeta by měla sedět pohodlně, ale pevně.
4. Měření můžete také provést na pravé ruce. V tom případě je pozice displeje jako na obrázku:

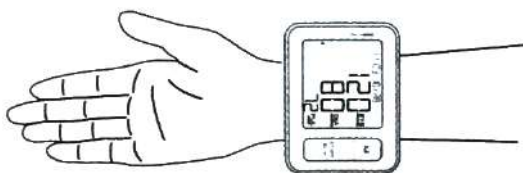

• Poznámky

- Ujistěte se, že velikost zápěstí odpovídá obvodu manžety; viz rozsah v sekci “SPECIFIKACE”.
- Provádějte měření pokaždé na stejném místě zápěstí.
- Nehýbejte rukou, tělem ani monitorem v průběhu měření.
- 5 minut před měřením zůstaňte v klidu.
- Udržujte manžetu čistou. Doporučujeme pravidelně čistit manžetu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Neoplachujte monitor nebo manžetu tekoucí vodou.
- Neodstraňujte monitor z manžety.


POLOHA TĚLA V PRŮBĚHU MĚŘENÍ

- Sedněte si pohodlně s chodidly položenými na zemi, aniž byste křížili nohy. Během měření zůstaňte v klidu. Nehýbejte zápěstím, tělem nebo monitorem.
- Položte ruku volně před sebe dlaní vzhůru na rovný povrch.
- Střed manžety by měl být v úrovni pravé srdeční komory.




MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

a)

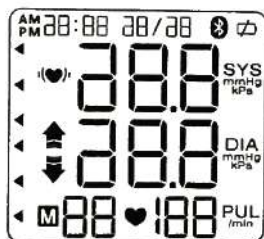

b)

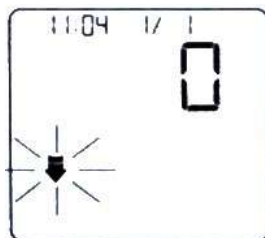

c)



1. Aplikujte manžetu a v pohodlné poloze stiskněte tlačítko “START/STOP”. Kontrolně se rozsvítí všechny znaky displeje (obr. a). Pokud některý znak chybí, kontaktujte zákaznický servis.
2. Následně zobrazí monitor nulovou hodnotu (obr. b).
3. Následně monitor automaticky začne tlakovat manžetu. Po natlakování se začne manžeta upouštět a přístroj provádí měření tlaku a pulsu. Jakmile bude měření provedeno, výsledek se zobrazí na obrazovce a nafukování se zastaví. Pokud bude během měření zaznamenána arytmie, bude na displeji blikat symbol pro nepravidelnou srdeční akci (obr. c). Na displeji bude blikat indikace klasifikace vysokého krevního tlaku. Výsledek se automaticky uloží do paměti.
4. Displej se po 1 minutě nečinnosti vypne. Displej vypnete také tlačítkem “START/STOP”.


- Pro zobrazení výsledku posledního měření stačí stisknout tlačítko M.
- Stiskem tlačítka "START/STOP" můžete měření kdykoliv přerušit.

 Pro interpretaci výsledků kontaktujte svého lékaře.


 Neměňte doporučení svého lékaře na základě aktuálních výsledků měření, která neodpovídají vašim pocitům nebo v případě, že jste přesvědčeni, že je výsledek měření chybný.

ZOBRAZENÍ ULOŽENÝCH ÚDAJŮ


- Předešlá měření můžete zobrazit v paměti přístroje stisknutím tlačítka "M". LCD displej zobrazí počet uložených měření (obr. d). Následně LCD displej zobrazí průměrnou hodnotu uložených měření (obr. e). Nejsou-li v paměti uložena měření, displej zobrazí nuly (obr. f).
- Ve chvíli, kdy se zobrazuje průměr, zmáčknete tlačítko M. Tím vyvoláte výsledek posledního uloženého měření (obr. g). Postupně se objeví krevní tlak a tep. Pokud byl při měření zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus, bude u údajů blikat jeho symbol. Opakovaným stisknutím tlačítka M vyvoláte z paměti další naměřené hodnoty (obr. h).
- Monitor se vypne stisknutím tlačítka M po vyvolání poslední hodnoty v paměti. Monitor se automaticky vypne po 1 minutě nečinnosti. Monitor také vypnete kdykoliv manuálně stisknutím tlačítka Start/Stop.

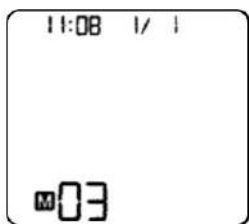

d)

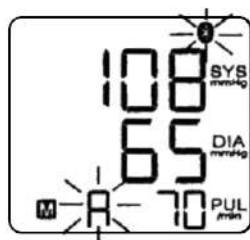

e)

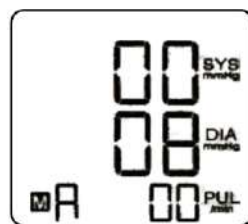

f)



g)



h)

SYNCHRONIZACE ULOŽENÝCH ÚDAJŮ


- V režimu stand-by stiskněte tlačítko M. Monitor vyhledává Bluetooth kontakt a na displeji bliká ikona Bluetooth (viz výše obr. b). Symbol přestane blikat po nalezení signálu (viz výše obr. d).
- V případě že se Bluetooth symbol objeví, ale neblíká, je tlačítko nefunkční.
- V případě, že není Bluetooth připojeno, monitor se po 1 minutě nečinnosti automaticky vypne. Monitor můžete také vypnout manuálně stisknutím tlačítka Start/Stop.
- Poté, co úspěšně proběhne synchronizace dat, monitor automaticky smaže údaje z interní paměti a uvolní tím místo pro další záznamy.

SMAZÁNÍ ÚDAJŮ Z PAMĚTI

Vyvolejte zobrazení výsledků paměti.

Vymazání všech zaznamenaných údajů provedete stisknutím tlačítka M po dobu 3 sekund.

Následným stisknutím tlačítka Start/Stop monitor vypnete.

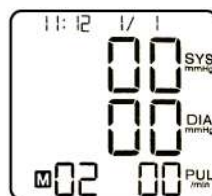


HODNOCENÍ KREVNIHO TLAKU U DOSPĚLÝCH OSOB

Následující průvodce hodnocení vysokého krevního tlaku (bez ohledu na věk a pohlaví) byl stanoven Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Berte prosím na vědomí, že v osobním hodnocení je nutné zohlednit další faktory (například diabetes, obezitu, kouření apod.).

Výsledky vždy konzultujte s vaším lékařem. Neměňte svou léčbu na základě vlastního rozhodnutí.

Obrázek a tabulka neslouží k poskytnutí informací vedoucích ke změně diagnózy nebo k akutním zdravotním zásahům. Barevné schéma je určeno pouze k informativnímu rozlišení mezi různými úrovněmi krevního tlaku.

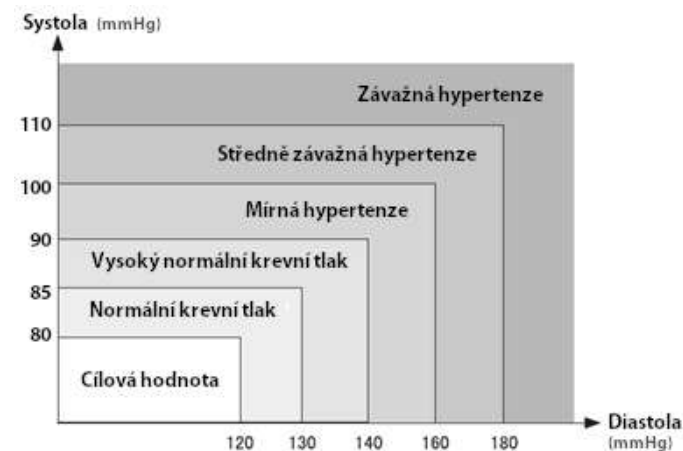




Klasifikace vysokého TK	Systolický krevní tlak (mmHg)	Diastolický krevní tlak (mmHg)	Barevná indikace
Cílová hodnota	< 120	< 80	zelená
Normální krevní tlak	120 – 129	80 – 84	zelená
Vysoký normální krevní tlak	130 – 139	85 – 89	zelená
Mírná hypertenze	140 – 159	90 – 99	žlutá
Středně závažná hypertenze	160 – 179	100 – 109	oranžová
Závažná hypertenze	> 180	> 110	červená

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Slabá baterie (displej zobrazuje ikonu slabé baterie)	ZNízká kapacita baterií.	Vyměňte baterie.
Displej zobrazuje “Er0”	Tlakový systém není připravený k měření.	Opakujte měření. V průběhu měření nehýbejte rukou ani monitorem.
Displej zobrazuje “Er1”	Nelze detekovat systolický tlak.	
Displej zobrazuje “Er2”	Nelze detekovat diastolický tlak.	
Displej zobrazuje “Er3”	Plnění vzduchem je blokováno, nebo je manžeta během nafukování příliš utažená.	Nasadte si manžetu znovu a opakujte měření.
Displej zobrazuje “Er4”	Únik při plnění vzduchem, nebo je manžeta při nafukování příliš volná.	
Displej zobrazuje “Er5”	Tlak manžety přesahuje 300 mmHg.	Zopakujte měření po 5 minutách. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím technickou podporu na helpcenter.ihealthlabs.eu .
Displej zobrazuje “Er6”	Tlak manžety déle než 160 sekund přesahuje 15 mmHg.	
Displej zobrazuje “Er7”	Chyba v přístupu k paměti.	
Displej zobrazuje “Er8”	Chyba kontroly parametrů zařízení.	
Displej zobrazuje “ErA”	Chyba tlakového senzoru.	
Stisknutí tlačítka je bez odezvy.	Nesprávný úkon nebo silné elektromagnetické rušení.	Vyjměte baterie z monitoru na 5 minut a poté je znovu vložte. Nezapomeňte na správnou polaritu baterií.

Máte otázky, nebo potíže? Prosím kontaktujte tým podpory na emailu support@ihealthlabs.com nebo navštivte stránky v části Support na www.ihealthlabs.eu nebo část Help v aplikaci iHealzh MyVitals.

PÉČE A ÚDRŽBA

-  1. S monitorem zacházejte opatrně, zabraňte pádu, nevystavujte jej působení ostrých předmětů.
 -  2. Nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Neponořujte monitor do vody, vlhkost může vést k jeho nevratnému poškození.
 -  3. Nerozebírejte monitor, neoddělujte jej od manžety.
4. Je-li monitor skladován v teplotách pod bodem mrazu, nechte jej před použitím dosáhnout pokojové teploty.
 5. V případě, že tlakoměr nepoužíváte delší dobu, prosíme vyjměte baterie.
 6. Servisní kontrolu přístroje doporučujeme provádět každé 2 roky, nebo po každé opravě. Pro případ servisní kontroly prosím kontaktujte zákaznický servis na helpcenter.ihealthlabs.eu.
 7. Výměna manžety by měla být prováděna pouze kvalifikovaným technikem iHealth. V opačném případě může dojít k poškození vašeho přístroje.
 8. Čistěte monitor suchým měkkým hadříkem nebo navlhčenou a dobře vyždímanou jemnou látkou za použití vody, zředěného dezinfekčního alkoholu nebo roztoku pracího prostředku.
 9. Žádná součást monitoru nevyžaduje údržbu uživatelem. Schéma zapojení, seznam součástí, popisy, kalibrační instrukce nebo jiné informace, které pomohou příslušně kvalifikovanému odbornému personálu opravit části zařízení určené k opravě, mohou být dodány technickým oddělením iHealth.
 10. Monitor si dokáže zachovat bezpečnostní a výkonové charakteristiky minimálně 10 000 měření nebo 3 roky používání. Manžeta si zachovává integritu na 1 000 měření.
 11. Je doporučena dezinfekce každé 2 týdny v případě, že je manžeta používána v nemocnici nebo na klinice. Otřete vnitřní stranu (strana, která je v kontaktu s pokožkou) manžety měkkým hadříkem lehce navlhčeným ethylalkoholem (75 – 90 %). Poté nechte manžetu oschnout na vzduchu. Monitor vyžaduje 6 hodin k zahřátí z minimálních tepelných skladovacích podmínek při 20 °C do stavu, který je určený v části ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.
 12. Monitor vyžaduje 6 hodin k zahřátí z minimálních tepelných skladovacích podmínek při 20 °C do stavu, který je určený v části ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.
 13. Neprovádějte servis / údržbu, pokud je přístroj spuštěný.

KONTAKTY A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Distribuce: iHealthLabs Europe SAS 36 Rue de Ponthieu, 75008, Paris, France

www.ihealthlabs.eu

E-mail: contact@ihealthlabs.eu



ANDON HEALTH CO., LTD
No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China
Tel.: 86-22-60526161

Výhradní dovozce pro ČR: EasyCo s.r.o., Bezová 1658/1, budova Golden Office, 147 00 Praha 4
Česká republika, +420 261 211 521, info@easystore.cz, www.easystore.cz

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Komponenty přicházející do kontaktu s lidským tělem (pouze manžeta)



JE NEZBYTNÉ PŘEČÍST SI NÁVOD K OBSLUZE

Podkladová barva symbolu: modrá. Barva grafického symbolu: bílá.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – Elektroodpad by se neměl likvidovat spolu s domovním odpadem. Prosím recyklujte na místech k tomu určených. Informujte se a požádejte o radu na místním úřadě nebo u prodejce.



UDRŽUJTE V SUCHU



VAROVÁNÍ



VÝROBCE



SÉRIOVÉ ČÍSLO



EVROPSKÝ ZÁSTUPCE

CE 0197

V SOULADU S POŽADAVKY MDD 93/42/EEC

IP22

Charakteristické číselné symboly označující stupně ochrany:

“Ochrana zařízení před dotykem nebezpečných částí a vniknutím cizích pevných těles”
a “Ochrana zařízení proti vniknutí vody s nebezpečnými účinky”.