

# iHealth™

## iHealth PO3 Bluetooth pulsní oxymetr



## Rychlý start

## Úvod

Gratulujeme k zakoupení iHealth PO3 Bluetooth pulsní oxymetr. Vámi zakoupený produkt měří saturaci krve kyslíkem a srdeční tep. iHealth PO3 je lehké, přenosné zařízení provádějící neinvazivní a bezprostřední měření. Následující řádky Vám pomůžou s prvními kroky.

## Postup při prvním zapnutí

### 1. Nabijte zařízení

- Připojte iHealth PO3 do USB portu dokud indikátor baterie nepřestane svítit

### 2. Stáhněte aplikaci

- Stáhněte a nainstalujte iHealth aplikaci. Hledejte "iHealth SpO2". (iOS by mělo být aktualizováno na verzi 5.0 a výš)



### 3. Vytvořte uživatelský a cloud účet

- Po stáhnutí aplikace vytvořte a nastavte uživatelský účet dle instrukcí v aplikaci. Po úspěšném založení uživatelské účtu budete mít také přístup zdarma k iHealth Cloud účtu. Pro propojení účtu s Vaším PC nebo MACem navštivte a přihlašte se na [www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com).

### 4. Zapněte funkci Bluetooth

- Zapněte funkci Bluetooth, v sekci nastavení ve Vašem iOS zařízení. (Po prvním spárování se nastaví datum a čas mařícího zařízení). Zařízení se bude nadále automaticky propojovat s Vaším iOS zařízením po zapnutí.

## Procedura měření

### 1. Vložte prst

- Povolte svorku a vložte prst levé ruky do iHealth PO3 (pouze prostředníček, prsteníček nebo ukazováček)
- Prst mějte nehtem dolů. viz.: obrázek



### 2. Spusťte iHealth PO3

- Stiskněte tlačítko Start na svrchní straně zařízení. Zároveň spustíte měření
- Během měření zůstaňte v klidu
- Po několika sekundách se zobrazí výsledky testu na displeji zařízení, poté se zapne aplikace ve Vašem iOS zařízení. (V případě neúspěšného měření vyměňte prst)

**Výhradní dovozce pro ČR a Slovensko:**

**EasyCo s.r.o.**  
Štěrboholská 1307/44  
102 00 Praha 10  
Česká republika  
tel.: (+420) 261 211 521, 261 224 555  
[www.easyapple.cz](http://www.easyapple.cz)  
[www.easyco.cz](http://www.easyco.cz)  
[info@easyco.cz](mailto:info@easyco.cz)