


iHealth®

Odběrové zařízení

Zamýšlené použití

Odběrové zařízení iHealth a lancety iHealth jsou speciálně navrženy pro použití se systémem pro monitorování glukosy. Jsou určeny k odběru vzorků krve z konečků prstů nebo jiných míst na těle při testování hladiny glukózy v krvi. Důležité: Odběrové zařízení iHealth je určeno pouze pro vlastní potřebu a neměly by jej používat zdravotničtí pracovníci. Nesdílejte ani znovu nepoužívejte lancety.


Součásti a displej

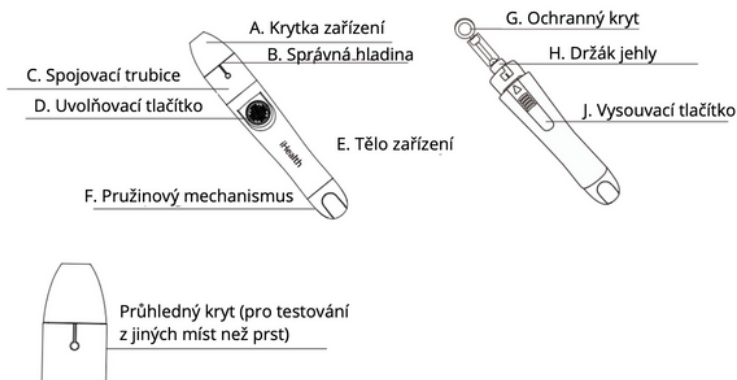

Použití lancety

1. Sejměte krytku

Sejměte krytku zařízení a spojovací hadičku. Otočte spojovací hadičkou a ujistěte se, že je "△" zarovnáno s "▽" na tlačítku pro vysunutí. V tomto okamžiku uslyšíte zvuk „cvaknutí“ a sejměte krytku zařízení a spojovací hadičku.

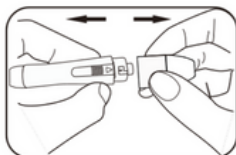


2. Vložení lancety

Vložte lancetu do držáku jehly a pevně ji zatlačte dolů, dokud nebude zcela zasunuta.



3. Odšroubujte ochranný disk (nevyhazujte)


Odšroubujte ochranný kryt a uschovejte jej pro likvidaci lancety.

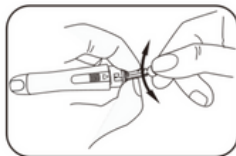


4. Nasadte krytku odběrového zařízení

Nasadte krytku zařízení a spojovací hadičku zpět na zařízení. Otočte spojovací hadičku a ujistěte se, že je "▽" na tlačítku pro vysunutí zarovnáno s "○" na spojovací hadičce. V tomto okamžiku uslyšíte zvuk „cvaknutí“.


Pro testy z prstu použijte krytku zařízení na odběrovém zařízení. Pro testy z předloktí, paže, ruky, stehna a lýtky použijte průhlednou krytku.

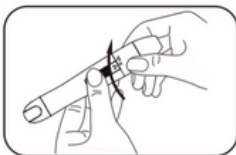

5. Nastavení úrovně lancetového vpichu
Držte krytku zařízení v jedné ruce a tělo zařízení v druhé a nastavte ji na správnou úroveň (obvykle 3). Okénko pro zobrazení hloubky je na stejné straně jako tlačítko pro uvolnění.

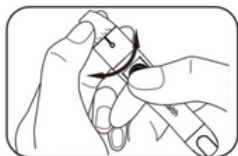

6. Zatáhněte za rukojeť
Zatáhněte za pružinový mechanismus zařízení.
Nyní jste připraveni provést měření hladiny glukózy v krvi.

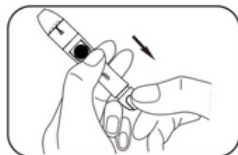

Vyberte preferované místo testu

Varování: Pokud testujete hypoglykémii (nízkou hladinu glukózy v krvi) nebo pokud si hypoglykémie neuvědomujete, doporučujeme provést test z prstů.

Pro odběr krve z prstu

- Lehce se dotkněte odběrovým zařízením (s krytkou) boku špičky prstu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když odběr provádíte ve stínovaných oblastech.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění.
- V případě potřeby jemně stiskněte prst, dokud se nevytvoří kapka krve o velikosti špendlíkové hlavičky (příklad: ●).
- Další informace o měření hladiny glukózy v krvi pomocí systému pro monitorování glukózy naleznete v uživatelské příručce.




Poznámky: Výsledky měření hladiny glukózy v krvi z předloktí, paže, ruky, stehna a lýtky se ne vždy shodují s výsledky z konečků prstů. Nepoužívejte k testování jiná místa než konečky prstů, pokud hladina cukru v krvi rychle stoupá nebo klesá, do 2 hodin po jídle, po falešné aplikaci inzulínu, bezprostředně po cvičení nebo pokud jste nemocní či ve stresu.



Píchnutí do předloktí, paže, ruky, stehna nebo lýtky

Abyste na povrch testovaného místa dostali čerstvou krev, důkladně jej třete několik sekund, dokud neucítíte, že se zahřívá. Píchněte testované místo lancetou takto:

- Přidržete průhledný uzávěr na horní straně testovaného místa. Stiskněte tlačítko pro uvolnění. Nezvedejte.
- Pevně tlačte na lancetu, dokud se nevytvoří dostatečná kapka krve.
- Zvedněte lancetu rovně nahoru a dávejte pozor, abyste nerozmazali vzorek krve na testovaném místě.

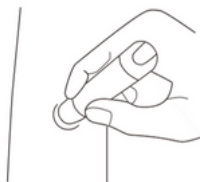


Důležité:


- Vyhnete se odběru krve do oblastí s viditelnými žilami nebo znaménky, abyste předešli nadměrnému krvácení.
- Vyhnete se odběru krve do oblastí se šlachami nebo kostmi, jako jsou ruce a kotníky.
- Je vyžadován vzorek krve o velikosti špendlíkové hlavičky 0,7 μ l (příklad: ●).
- Další informace naleznete v návodu k obsluze glukometru.

Vyjmutí použité lancety

- Před likvidací vložte lancetu do krytu. Sejměte krytku zařízení a spojovací hadičku a vložte hrot lancety do ochranné krytky.

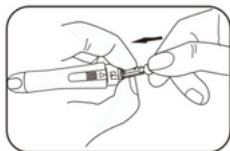

- Použitou lancetu řádně zlikvidujte. Stiskněte tlačítko pro vysunutí, poté zatlačte ochrannou krytku zpět do původní polohy a použitou lancetu zlikvidujte ve vhodné nádobě.

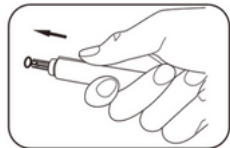

Varování:

- Při používání zařízení se vyvarujte náhodného zranění sebe nebo jiných osob.
- Uchovávejte odběrové pero a lancetu mimo dosah dětí.
- Při instalaci lancety nestiskněte tlačítko pro uvolnění, pokud je krytka zařízení odstraněna.
- Po použití lancetu v zařízení nenechávejte.
- Nesdílejte zařízení s jinými osobami ani ji znovu nepoužívejte.
- Před použitím zařízení dezinfikujte, ale neponořujte jej do žádné tekutiny.
- Zástrčku zařízení vytahujte opatrně, aby se nevysunula.
- Odběrové pero by mělo pevně a svisle tlačít na kůži, jinak by to ovlivnilo odběr krve.

Čištění a dezinfekce

Čištění a dezinfekce jsou naprosto nezbytné pro přesnost testu, protože čištění může zajistit správné fungování odběrového zařízení a dezinfekce může zabránit infekci nebo křížové infekci vás nebo jiných osob.

Důrazně doporučujeme, abyste glukometr a odběrové zařízení po každém použití vyčistili a dezinfikovali. Doporučujeme také používat následující produkt: CaviWipes (registrační číslo EPA: 46781-8).

Ukázalo se, že CaviWipes s isopropanolem a diisobutyl-fenoxy-ethoxyethyl dimethylbenzylamoniumchloridem jako aktivní složkou jsou bezpečné pro použití s glukometrem a odběrovým zařízením.

Informace o produktu a technické informace a možnost zakoupení tohoto produktu naleznete na www.metrex.com nebo kontaktujte společnost Metrex na čísle 1-800-800-841-1428.

a. Před testem by si měl uživatel umýt ruce.

b. Po testování použijte k čištění a dezinfekci odběrového pera ubrousky Cavi Wipes™ (Metrex® Research Corporation, EPA Reg. No. 46781-8, EPA Est. No. 56952-WI-001) po dobu 180 sekund.

Poznámka:

1. Každý krok dezinfekce vyžaduje předběžné čištění.

2. Neponořujte tělo odběrového pera do vody ani do žádné jiné kapaliny. Skladujte v suché, čisté a dobře větrané místnosti.

3. Po manipulaci s odběrovým perem si uživatelé důkladně umyjí ruce mýdlem a vodou.

4. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím číslo +7-855-816-7705.

5. Podrobné informace naleznete na následujícím odkazu:

„Oznámení FDA pro veřejné zdraví: Používání zařízení pro vpich do prstu na více než jedné osobě představuje riziko přenosu patogenů přenášených krví: První sdělení“ (2010)
<http://www.fda.gov/Medical-Devices Safety AlertsandNoticeslucm224025.htm>
„Klinická připomínka CDC: Používání zařízení pro vpich do prstu na více než jedné osobě představuje riziko přenosu patogenů přenášených krví“ (2010)
<http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Model produktu: HH-XVI-T
Vyrobeno pro iHealth Labs, Inc.

USA
iHealth Labs, Inc. www.ihealthlabs.com
150C Charcot Ave, San Jose, CA 95131,
USA 1-855-816-7705
(8:30–17:30 PST, pondělí až pátek)

Evropa:
 Šanghaj International Holding Corp.GmbH (Evropa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburk, Německo



Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
A01, závod B, č. 278 Hangkong Road, zóna volného obchodu Tianjin
Pilot (průmyslový park Air Port), Tianjin 300308, Čína
Vyrobeno v Číně

SYMBOLY :



Autorizovaný zástupce v Evropském společenství



Vyhovuje požadavkům evropské směrnice
o diagnostických diagnostických
prostředcích (98/79/ES)



Sériové číslo



VÝROBCE



Viz návod k použití

Datum revize: 14. 4. 2022
Verze: V2.0